

岩盐气溶胶治疗仪

Rock salt aerosol therapeutic Instrument



用以治疗呼吸系统疾病

特点

非药物 物理疗法


作用原理

化痰祛痰、抗炎消肿
增强呼吸系统免疫力



型号：QF-SJ101A

型号：QF-SQ202A4

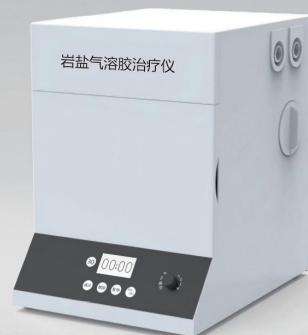

长沙清霏医疗科技有限公司出品

非广告用途，仅供相关医学人士参考 QF2025.2

产品注册证：湘械注准20232090023

生产许可证：湘药监械生产许20230058号




单人面罩型

型号: QF-SJ101A

特点

- ◆ 单人佩戴面罩及雾化管使用;
- ◆ 便携式, 体积小;
- ◆ 计时功能, 低噪音设计;
- ◆ 操作简单, 维护简单, 涉盐部件可水洗;
- ◆ 5微米以下颗粒达到85%以上;
- ◆ 岩盐气溶胶微粒(直径1-5 μm)浓度3mg/m³以上;

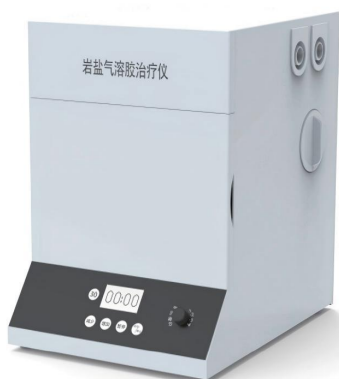

多通道型

型号: QF-SQ202A2 QF-SQ202A3
QF-SQ202A4

特点

- ◆ 医用型, 可1-4人同时使用;
- ◆ 一机多人用, 提高效率, 降低成本;
- ◆ 需接入雾化管面罩(咬嘴)使用;
- ◆ 双泵组设计, 经久耐用;
- ◆ 计时功能, 低噪音;
- ◆ 操作维护简单, 涉盐部件可水洗, 提高维护效率;
- ◆ 除湿设计, 可高湿夏天正常使用;
- ◆ 5微米以下颗粒达到85%以上;
- ◆ 岩盐气溶胶微粒(直径1-5 μm)浓度3mg/m³以上;



弥散型

型号: QF-SQ202B

特点

- ◆ 医用型, 可8人同时使用;
- ◆ 一机多人用, 提高效率, 降低成本;
- ◆ 需10平米房间, 无需佩戴面罩;
- ◆ 双泵组设计, 经久耐用;
- ◆ 计时功能, 低噪音设计;
- ◆ 操作维护简单, 涉盐部件可水洗, 提高维护效率;
- ◆ 具有除湿功能, 可高湿夏天正常使用;
- ◆ 5微米以下颗粒达到85%以上;
- ◆ 岩盐气溶胶微粒(直径1-5 μm)浓度3mg/m³以上;




专用岩盐配料

型号: QFY40, QFY60, QFY100


- ◆ 三层密封包装, 确保干燥;

01 作用原理

1)化痰

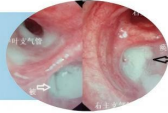


2)排痰

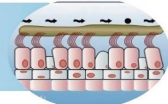


3)消肿



4)增强巨噬细胞活力

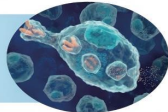

5微米以下
岩盐颗粒

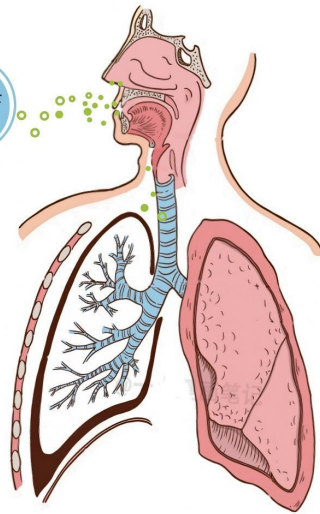

岩盐颗粒具有渗透作用，5微米以下的盐颗粒，随着气流进入气管、支气管及肺部，沉积在粘稠的痰上，使其变稀；沉积在气管壁上，湿化气道促进纤毛运动，进而促进排痰，同时使气管壁消肿；沉积在细菌细胞壁上，使细菌脱水而凋亡，盐颗粒可增强巨噬细胞活力，进而增加呼吸系统免疫力。

02 治疗方案及作用

联合治疗

可独立治疗

急性期

缓解期

康复期

预防期

联合治疗

岩盐气溶胶治疗+常规疗法，具有协同效应，促进愈合，加快病程，减少住院天数；减少部分药物使用甚至停药；

独立进行岩盐气溶胶治疗

特别适合呼吸道引流功能障碍患者，也适合不宜用药的预防期，可预防或延缓复发。

03 用法用量与疗程

下呼吸道疾病患者：

儿童：

用法：用口吸入；

用量及疗程：一天一次，每次30分钟；每个疗程5天；

用后：多喝水，清洁面部，用生理性盐水喷雾湿润鼻腔

成人：

用法：用口吸入；

用量及疗程：每天一次，每次30-60分钟；每个疗程5天。

用后：多喝水，清洁面部，用生理性盐水喷雾湿润鼻腔。

上呼吸道疾病患者：

儿童和成人：

用法：鼻腔吸入；

用量及疗程：一天一次，每次10-15分钟；每个疗程3天；

用后：多喝水，清洁面部，用生理性盐水喷雾湿润鼻腔。

04 禁忌症

呼吸系统疾病明显恶化患者 | 咯血和有咯血倾向患者 | 其他系统和器官明显病变的患者。

专家共识

推荐岩盐气溶胶疗法

1.《雾化祛痰临床应用的专家共识》指出：通过吸入空气中饱和的岩盐气溶胶微粒（直径1-5 μm ，浓度3mg/m³以上），可改善支气管内容物的物流性，从而促进黏液廓清。

2.《尘肺病肺康复中国专家共识(2022年版)》

岩盐气溶胶主要的治疗机制包括抗炎杀菌，消除水肿,增强呼吸道黏液纤毛廓清作用,改善呼吸系统免疫功能。

3.《呼吸病学（第3版）》

即便单纯吸入岩盐气溶胶，亦有助于湿化气道、排痰消炎、止咳平喘，对于慢性气道炎症、哮喘和尘肺患者有明显疗效。

适用症状

慢性支气管炎 | 支气管扩张 | 哮喘 | 慢阻肺 | 肺气肿 | 尘肺 | 肺炎 | 咳嗽咳痰 | 感冒 | 气道感染 | 囊性纤维化 | 鼻窦炎 | 过敏性鼻炎 | 术后气道管理

适用科室

呼吸内科 | 职业病科 | 耳鼻喉科 | 儿科 | 老年科 | 康复科 | 妇幼保健科 | 胸外科 | 神经外科 | 重症科室.....

清霏医疗成立于2022年，总部位于北京，专注于呼吸健康产品的研发生产。已研发生产具有自主专利技术的岩盐气溶胶治疗仪，获二类器械证书，用以呼吸道疾病治疗与康复，特别是对慢性呼吸道疾病的治疗具有独特优势。公司产品丰富，有多人使用的面罩版和弥散式盐疗室，以及适合医院和家庭使用的单人面罩版，实现多场景应用。产品安全有效，具有更好的应用体验。



长沙清霏医疗科技有限公司出品

服务热线：400-8789-981



生产地址：长沙浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心北京

总部地址：北京市海淀区信息路15号403

湖南销售地址：湘江新区麓谷企业广场F4栋1302-1305

电话：陶经理17773132527 陈经理13667366835